


《シールドの取り付け方について》

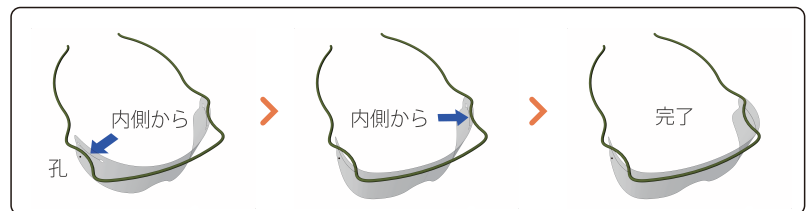

《シールドについて》 素材：親水性防曇加工PETフィルム

**使用上の注意** ※取り扱いを誤った場合、ケガや物的損傷を負う可能性があります。

- ①本製品は滅菌されておりません。有機溶剤等、不適当な薬品を使用した滅菌、清掃はフィルムの劣化、破損の原因となりますので行わないでください。
- ②本製品は保護シートが貼られています。必ず保護シートを剥がしてご使用下さい。保護シートを付けたまま使用すると視界が悪く危険です。
- ③本製品の厚さは0.3mm以下と薄いために、使い方を誤ると、手や顔などの皮膚にキズを付ける可能性があります。また、透明度が高いために、目がフィルムを認識し損なうことがあります。目に入れて怪我をしないように、また、皮膚にキズを付けないようご注意ください。

《フレームについて》 素材：ステンレス 銀灰は処理なしその他の色は酸化被膜処理（白磁のみ抗菌塩化ビニル被覆）

**使用上の注意** ※取り扱いを誤った場合、ケガや物的損傷を負う可能性があります。

- ①本製品は滅菌されておりません。（白磁のみ抗菌加工）お手入れ方法は、柔らかい布などに除菌剤等を含ませ優しく拭いてください。 ※医療現場で使用される場合は、滅菌処理が可能です。（白磁以外のフレーム）
- ②本製品はステンレス素材でものづくりしていますが、銀灰以外は酸化被膜処理が施されているため、金属アレルギーの方でもご使用いただけますが、万が一肌に触れる部分に痒みやかぶれなどが生じた場合はご使用をおやめください。（白磁のみ抗菌塩化ビニル被覆）
- ③本製品の掛け外しは両手でフレームを持ち、ゆっくりと行ってください。片手で掛け外したり、急いで掛け外した際にフレームの先端で眼や顔を傷つけることがありますので、十分にご注意ください。
- ④本製品はフィッティング調整が可能な構造になっていますが、誤った調整を行うと、逆にフィッティング性能が悪くなります。また、調整時にフレームの先端でケガをすることもありますので、調整には十分ご注意ください。



株式会社 スクエアメディカル  
 〒612-8436  
 京都市伏見区深草新門丈町106番地4  
 TEL (075) 641-1107 FAX (075) 641-1114  
 info@squaremedical.co.jp  
 www.squaremedical.co.jp